



**PURALID™  
LIPOGEL**

P  
U  
R  
A  
L  
I  
D  
  
P  
U  
R  
A  
L  
I  
D  
  
P  
U  
R  
A  
L  
I  
D  
  
P  
U  
R  
A  
L  
I  
D  
  
P  
U  
R  
A  
L  
I  
D  
  
P  
U  
R  
A  
L  
I  
D

## Bruksanvisning

**Puralid™ Lipogel** for bruk ved blefaritt eller blefarokonjunktivitt

### Hva er Puralid Lipogel?

**Puralid Lipogel** er et oftalmisk produkt som beroliger og lindrer øyelokkene og det periokulære området. Inneholder liposomer, Tea Tree-olje, vitamin A, xanthan-gummi, ferulinsyre, vitamin E TPGS og alfa bisabolol.

**Liposomer**, som er dannet av et dobbelt lag av fosfolipider, er kjent for lindrende og mykgjørende effekt og for evnen til å overføre aktive ingredienser.

**Tea Tree-olje**, ekstrahert fra *Melaleuca alternifolia*, er kjent for antimikrobielle egenskaper.

**Vitamin A** styrker og opprettholder huden ved å regulere epitelial funksjon. Det er også en antioksidant som, sammen med **xanthan-gummi**, **ferulinsyre** og **vitamin E TPGS**, fungerer i samspill med liposomene for å beskytte overflatene på øyelokket mot oksyderende effekt fra frie radikaler og UV-stråling.

**Alfa bisabolol** er hovedingrediensen i eterisk kamilleolje. Den har lindrende egenskaper, reduserer rødhet og betennelse selv ved spesielt følsom hud. Den har karakteristisk god hudtoleranse.

### Hva brukes Puralid Lipogel til?

**Puralid Lipogel** myker opp og fjerner flassende rester på øyelokket ved betennelsestilstander som blefaritt eller blefarokonjunktivitt.

### Hvor ofte bør jeg bruke Puralid Lipogel?


Bruk produktet to ganger pr. dag, oftere dersom det anbefales av din lege.

### Hvordan bruke Puralid Lipogel


**1.** Vask hendene grundig.




**2.** Påfør en liten mengde Puralid Lipogel på fingertuppene.

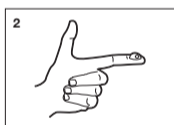

**3.** Gni det forsiktig på øyelokkene med sirkulerende bevegelser.

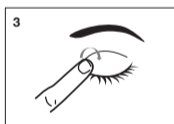

**4.** La være på noen få minutter. Tørk av avflassing med en ren klut eller en bomullsdott.

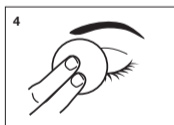

### Les hele pakningsvedlegget nøye før du bruker dette produktet.

Oppbevar pakningsvedlegget i tilfelle du trenger det igjen.

Ved spørsmål, spør legen din eller på apoteket.

Dersom symptomene vedvarer eller det oppstår negative effekter, kontakt legen din.

### Hva er de mulige bieffektene?

ERSOM DU REGISTRERER BIEFFEKTER SOM IKKE ER ANGITT I DETTE PAKNINGSVEDLEGGET, KONTAKT LEGE ELLER APOTEKET OG INFORMER OM DET.

### Lagring av Puralid Lipogel

- Oppbevares ved høyst 25 °C
- Skal ikke fryses
- Holdes unna varme, fuktighet og direkte sollys
- Holdes utilgjengelig og ute av syne for barn

### Sammensetning:

Fosfolipider S80 (fra NIOLip) 1%, bisabolol 0,1 %, Tea Tree-olje 0,05 %, vitamin A palmitat 0,01 %, vitamin E TPGS 0,045%, ferulinsyre 0,04%, xanthan-gummi 1 %, EDTA dinatrium dihydrat, kaliumsorbat, natriumbenzoat, natriumhydroksymetylglukinat, sitronsyremonohydrat, kaliumsitrat tribasisk monohydrat, destillert vann.

### Advarsler

- Kun for utvortes bruk
- Stopp behandlingen dersom du er hypersensitiv
- Ikke bruk produktet etter at holdbarhetsdatoen på emballasjen er utløpt
- Ikke bruk produktet dersom emballasjen er skadet
- Bruk opp produktet innen 8 uker etter første påføring (15 ml flaske)
- Bruk opp produktet innen 24 timer etter første påføring (1 ml minibeholder)

### Presentasjoner:

Salgsprodukt - 15 ml flaske

Prøve – stripe av 5 minibeholdere på 1 ml

For mer informasjon, kontakt din lege eller det lokale salgskontoret på [www.santen.eu](http://www.santen.eu)

**Santen**

Denne brosjyren ble utgitt i april 2020



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Firenze, Italia

Symbol							
Betydning av symbolet	Beskyttes mot sollys	Beskyttes mot fuktighet	Se bruksanvisningen	Produsent av det medisinske produktet	Oppbevares ved høyst 25 °C	Ikke bruk dersom emballasjen er skadet	Brukes innen

016635



PURALID  
PURALID  
PURALID  
PURALID  
PURALID  
PURALID

## Bruksanvisning

**Puralid™ Lipogel** för användning vid blefarit och blefarokonjunktivit

### Vad är Puralid Lipogel?

**Puralid Lipogel** är en oftalmisk produkt som lindrar och rengör ögonlocken och det periokulära området. Den innehåller liposomer, tea tree-olja, vitamin A, xantangummi, ferulasyra, vitamin E alfa-tokoferyl-polyetylen glykol 1000-succinat och alfa-bisabolol.

**Liposomer** – som är utformade av ett dubbelt lager fosfolipider – är kända för sina lindrande och hudmjukgörande egenskaper, samt förmågan att effektivt tillföra verksamma ingredienser.

**Tea tree-olja**, som extraheras från melaleuca alternifolia, är känd för sina antimikrobiella egenskaper.

**Vitamin A** stärker och underhåller huden genom att reglera den epitela funktionen. Det är också en antioxidant som tillsammans med **xantangummi**, **ferulasyra** och **vitamin E alfa-tokoferyl-polyetylen glykol 1000-succinat** verkar i synergi med liposomer för att skydda ögonlockets yta från oxidativ påverkan av fria radikaler och UV-strålar.

**Alfa-bisabolol** är huvudkomponenten i eterisk kamomillolja. Den har lindrande egenskaper, minskar rodnad och inflammation, även vid speciellt känslig hud. Den karakteriseras av att tolereras väl av hud.

### Vad används Puralid Lipogel för?

**Puralid Lipogel** används för att mjukgöra huden på ögonlocken samt avlägsna hudflagor från ögonlocket som kan ha uppkommit vid inflammation, t.ex. blefarit eller blefarokonjunktivit.

### Hur ofta ska jag använda Puralid Lipogel?

Använd produkten två gånger dagligen eller oftare om det rekommenderas av din läkare.

### Hur används Puralid Lipogel


**1.** Tvätta händerna noggrant.




**2.** Tryck ut en liten mängd Puralid Lipogel på fingerspetsen.



**3.** Sprid varsam ut gelen på ögonlocken med cirkulära rörelser.

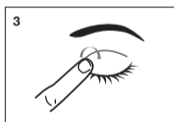

**4.** Låt verka i fem minuter. Torka bort eventuella flagor med en ren kompress eller en bomullsrandell.

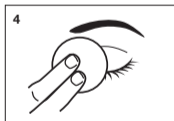

### Läs hela bipacksedeln noggrant innan du börjar använda produkten.

Behåll bipacksedeln eftersom du kan behöva läsa den på nytt.

Om du har ytterligare frågor, rådgör med läkare eller apotekspersonal.

Om symtomen kvarstår eller om du upplever någon biverkning, kontakta läkare.

### Vilka möjliga biverkningar kan uppkomma?

OM DU UPPLIVER NÅGON BIVERKNING SOM INTE FINNS MED I FÖRTECKNINGEN I DEN HÄR BIPACKSEDELN, INFORMERA DIN LÄKARE ELLER APOTEKSPERSONAL.

### Hur Puralid Lipogel förvaras

- Förvaras vid högst 25 °C
- Får ej frysas
- Utsätt inte för värme, fukt och direkt solljus
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

### Innehåll:

Fosfolipider S80 (från NIOLip) 1 %; bisabolol 0,1 %; tea tree-olja 0,05 %; vitamin A palmitat 0,01 %; vitamin E alfa-tokoferyl-polyetylen glykol 1000-succinat 0,045 %; ferulasyra 0,04 %; xantangummi 1 %; EDTA dinatriumdihydrat; kaliumsorbat; natriumbensoat; natrium-N-(hydroximetyl)-glycinat; citronsyra monohydrat; trikaliumcitrat monohydrat; destillerat vatten.

### Varningar

- Endast för utvärtes bruk
- Avbryt behandlingen om du är överkänslig
- Använd inte produkten efter utgångsdatumet som anges på förpackningen
- Använd inte produkten om förpackningen är skadad
- Använd inom 8 veckor efter att produkten har öppnats (15 ml flaska)
- Använd inom 24 timmar efter att produkten har öppnats (1 ml minibeållare)

### Förpackningar:

Försäljning – 15 ml flaska  
Prov – rad med 5 minibeållare med 1 ml

För ytterligare information kontakta läkare eller din lokala Santen-avdelning på [www.santen.eu](http://www.santen.eu)

# Santen

Denna bipacksedel kontrollerades i april 2020.



OFFHEALTH SpA, Via G. Paisiello 10, 50144 Florens, Italien

Symbol							
Symbolen betyder	Utsätt inte för direkt solljus	Förvaras torr	Läs bruksanvisningen	Tillverkare av medicinteknisk produkt	Förvaras vid högst 25 °C	Använd inte om förpackningen är skadad	Sista användningsdatum

# MARVACO

**MARVACO OY**  
PELTOTIE 20,  
FIN-28400 **ULVILA**, FINLAND  
repro@marvaco.fi  
**marvaco.fi • marvaco.se**

27.05.2020

Proof No. 3

# Santen

Part No: 3426-01

**Leaflet Puralid Lipogel**

Item No: 016606, 016607

Dimensions: 130x360 mm

Fonts/Size:  
Helvetica Neue 8-16 pt

Country: NO, SE

Component code:  
016635

Colors:



Black



Technical

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.